

Anvendelse:

CleanSeal Vet anvendes som beskyttende plaster på mindre sår, skrammer og operationssår.



Plasteret beskytter imod forurening af såret fra omgivelserne. Dette er specielt vigtigt for dyr der kommer i fugtige, eller snavsede omgivelser.




Produktet er også velegnet på steder, eller i miljøer, hvor sædvanlige bandager kun vanskeligt, eller ikke, kan anvendes.



Hurtig effekt.



Øjeblikkelig beskyttelse mod infektion og bakterier.

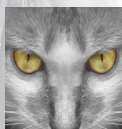

Vandtæt og åndbart.



Let at anvende.



CleanSeal Vet



SPRAY PLASTER TIL DYR



A.C. Illums Vej 6. DK- 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86817522
www.chemvet.dk - info@chemvet.dk



Pet Care



Fordele med **CleanSeal Vet**

- Hurtig effekt
- Øjeblikkelig beskyttelse mod infektion og bakterier
- Vandtæt og åndbart
- Enkelt og hurtigt at bruge
- Er usynlig
- Forsvinder igen af sig selv

CleanSeal Vet indeholder:

Norfluran
Etylacetat
Acrylat copolymer
Nitrofural.

Brugsvejledning:

Til dækning af mindre sår og skrammer samt operationssår.

Rens såret grundig inden brug af **CleanSeal Vet**.

Hold **CleanSeal Vet** 5-10 cm fra såret, og spray ét tyndt lag på, så det er dækket.

Der må ikke sprayes mere end ét lag, fordi plasteret så bliver for tæt, så huden ikke kan ånde. Dette kan forsinke ophe-lingen.

Plasteret tørrer på 2-3 minutter.

Der må ikke sprayes på sår, hvor der er massiv blødning.

Efter 3-4 dage forsvinder plasteret ved slid og almindelig aktivitet.

Ved behov gentages applikationen.

Virkning:

CleanSeal Vet beskytter sår og rifter imod forurening fra omgivelserne, så ophe-lingen ikke forsinkes af forureninger fra dyrets miljø.

CleanSeal Vet danner et vandtæt ”åndbart” plaster, så der kan komme luft til såret, men ikke vand. Dette hjælper med til at såret heles hurtigst muligt.

Sikkerhed:

CleanSeal Vet er testet på både dyr og mennesker for eventuelle hudreaktioner under plastret.

Der var ingen negative hudreaktioner, hverken hos dyr eller mennesker.